



Alber® | **viamobil® eco V14**

Duwen zonder inspanning /
Pousser sans efforts



Het intelligente **ErgoDrive** concept van de **viamobil eco** zorgt ervoor dat de rolstoel uitermate ergonomisch en moeiteloos voort de duwen en af te remmen is. Om vooruit en achteruit te rijden, hoeft u slechts de duwstang licht in te drukken of omhoog te trekken. Makkelijk te leren, net als de andere functies van de **viamobil eco**.

*Le concept intelligente **ErgoDrive** du **viamobil eco** rend le fauteuil ergonomique et très commode à pousser ou à freiner. Pour s'avancer ou se reculer, il suffit d'appuyer sur le guidon ou de le tirer vers le haut. Facile à apprendre, tout comme les autres fonctions du **viamobil eco**.*



ErgoDrive - Eenvoudig en efficiënt / Simplicité et efficacité

Een sensor in de duwstang bemerkt dat de begeleider de rolstoel wil voortduwen en activeert het rijmechanisme. Wanneer de duwstang naar beneden wordt gedrukt, rijdt de rolstoel naar voren. Wanneer de duwstang omhoog wordt getrokken, rijdt de rolstoel achteruit. / *Un capteur dans le guidon détecte quand l'assistant veut pousser le fauteuil et active la roue motrice. Quand le guidon est tiré vers le haut, le fauteuil roule en arrière.*

Alles onder controle / Tout sous contrôle

Door middel van een draaiknop kan de motor aan- of uitgeschakeld worden, de snelheid bepaald worden en de vrijloop ingeschakeld worden. Door het veersysteem worden de oneffenheden in de weg automatisch gecompenseerd. De automatische remfunctie brengt de rolstoel veilig tot stilstand tijdens een bergafwaartse rit. / *Un bouton tournant permet d'allumer ou d'éteindre le moteur, de déterminer la vitesse et de laisser le fauteuil en roue libre. A l'aide du système d'amortissage, les irrégularités de la route sont compensées automatiquement. La fonction de freinage automatique arrête le fauteuil en toute sécurité lors d'une descente.*



Draagbaar en breed toepasbaar / Transportable et largement compatible

In enkele seconden is de **viamobil eco** zonder gereedschap te demonteren in drie compacte onderdelen die in elke kofferbak passen. De **viamobil eco** is eenvoudig te combineren met de meeste standaard rolstoelen en is, dankzij het slimme koppelsysteem, zonder gereedschap en in een handomdraai te bevestigen aan de rolstoel. De hoogte van de duwstang is in te stellen al naar gelang de lengte van de begeleider. / *En quelques secondes et sans outils, le **viamobil eco** est démontable en trois composants compactes qui entrent dans chaque coffre de voiture. Le **viamobil eco** est facile à combiner avec la plupart des fauteuils roulants standard, et s'attache en un tournemain et sans outils. La hauteur du guidon est ajustable selon la taille de l'assistant.*



**Compact en lichtgewicht /
Compactes et ultra-légers**

De componenten zijn eenvoudig te vervoeren. / *Les composants sont faciles à transporter.*



Alle functies zijn binnen handbereik dankzij de draaiknop. / *Toutes les fonctions se trouvent à portée de main grâce au bouton tournant.*



Anti-tippers normaliter aanbevolen, voor hellingen van meer dan 8% verplicht. / *Anti-basculés recommandées, obligatoires pour des pentes supérieures à 8%.*



Aandrijfunit met massieve banden, innovatieve vering en voetpedaal om het wiel omhoog en omlaag te bewegen. / *Roues motrices à pneus pleins avec amortisseur innovant et une pédale pour soulever et baisser les roues.*



Automatische lader met indicatielichtjes. Laadt de batterij in 7 u. op. / *Chargeur automatique avec voyants. Recharge la batterie en 7h.*



Eenvoudig aan de rolstoel te bevestigen. / *Facile à attacher au fauteuil.*



Bevestigingsbrackets verkrijgbaar voor vele types rolstoelen. / *Braquets d'attachement disponibles pour tout type de fauteuil.*










Autolader om de batterij op te laden in de auto, 12-32 V. Met automatische uitschakeling. / *Chargeur de voiture pour recharger la batterie dans la voiture, 12-32 V. Avec extinction automatique.*



Batterij is eenvoudig te plaatsen en te verwijderen. Met laad-aansluiting. / *Batterie facile à placer et à enlever. Avec connection pour chargeur.*

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product kunt u vinden op onze website. /
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet.

	Snelheid / Vitesse	Bereik / Autonomie	Batterijcapaciteit / Batteries	Gewicht batterij / Poids batteries	Remvermogen / Capacité de freinage	Max. totaal gewicht / Poids max. total	Max. gebruikers- gewicht / Poids max. utilisateur
viamobil eco	 max. 5,5 km/h	 12 km*	 24 V / 9 Ah	 6 kg	 10%	 19 kg (drive unit / unité de conduite: 10,5 kg)	 120 kg

* De actieradius varieert al naar gelang het terrein waarover wordt gereden en de heersende rijomstandigheden. Wanneer de rijomstandigheden optimaal zijn (vlak terrein, recent opgeladen accu's, een omgevingstemperatuur van 20° C, gelijkmatig rijgedrag) kan de opgegeven actieradius worden gehaald. / Le rayon d'action varie selon la surface sur laquelle on roule et selon les conditions de conduite. Quand les conditions sont optimales (surface plate, batterie récemment rechargée, température ambiante de 20° C, conduite constante), le rayon d'action mentionné peut être atteint.

Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be

Invacare N.V.
Autobaan 22
8210 Loppem
Belgium

