

Alber | e-motion® M15



Actieve aandrijving voor rolstoelen / Propulsion active pour fauteuils roulants

Voor bijna alle rolstoelgebruikers geldt dat het onmogelijk is om overal te komen, zelfs wanneer iemand fysiek erg sterk is. Hellingen en stoepranden vormen soms onmogelijke obstakels. Dankzij de **Alber e-motion** met elektrische aandrijving kunnen gebruikers voortaan hun actieve leven behouden en hun mobiliteit vergroten. /

*Pour presque tout utilisateur d'un fauteuil roulant, il est impossible de se déplacer partout, même quand cette personne est très forte physiquement. Des pentes, des seuils et des trottoirs forment parfois des obstacles imprenables. Grâce à l'**Alber e-motion** à propulsion électrique, les utilisateurs ont la possibilité de maintenir et même d'améliorer leur mobilité.*





Vergrote zelfstandigheid / Indépendance augmentée

Elektromotoren in de wielnaven, geactiveerd na geringe druk op de hoepels, zorgen voor extra duwkracht. Aanpassingen aan huis of auto zijn niet nodig, want de gebruiker kan zijn manuele rolstoel als zodanig blijven gebruiken. / *Des moteurs électriques dans les moyeux des roues, activés après une légère pression sur les cerceaux, garantissent une poussée additionnelle. Etant donné que l'utilisateur peut maintenir son fauteuil roulant manuel, aucune adaptation de l'habitation ou de la voiture n'est nécessaire.*

Therapeutische voordelen / Avantages thérapeutiques

De **e-motion** helpt om pijn en krachtvermindering in de armen te voorkomen door de belasting op spieren en gewrichten te reduceren en bevordert tegelijkertijd actief bewegen. / *L'e-motion aide à éliminer de la douleur et une force diminuée dans les bras en réduisant la charge des muscles et des articulations, et promeut ainsi le mouvement actif.*

Draagbaar en uitwisselbaar / Portable et interchangeable

Dankzij het quick-release systeem kunnen de **e-motion** wielen binnen een paar seconden van de rolstoel afgehaald worden. De **e-motion** is geschikt voor de meest gangbare rolstoelmodellen. De huidige rolstoelwielen kunnen eenvoudig vervangen worden door de **e-motion** wielen en als alternatief blijven gebruikt worden. /

Le système quick-release permet d'enlever les roues e-motion en quelques secondes. L'e-motion est compatible avec la plupart des fauteuils roulants courants. Les roues actuelles peuvent être remplacées facilement par des roues e-motion et peuvent être utilisées comme alternatives.

Opties / Options



De compacte en lichtgewicht componenten zijn eenvoudig te vervoeren. / *Les éléments compactes et ultra-légers sont faciles à transporter.*



Het gebruik van de hoepel activeert de **e-motion** hulpmotoren. / *Les moteurs d'assistance de l'e-motion s'activent après l'utilisation des cerceaux.*



Hoogwaardige lithium-ion batterij technologie vergroot de actieradius en is duurzaam. Deze zijn afneembaar voor transport. / *La technologie des batteries lithium-ion de haute qualité agrandit le rayon d'action et a une longue durée de vie. Celles-ci peuvent être enlevées pour le transport.*

Opties / Options



e-motion wiel is eenvoudig te verwijderen en verkrijgbaar in 22" en 24". / *La roue de l'e-motion est facile à enlever et disponible en 22" et 24".*



Automatische acculader. / *Chargeur automatique.*



Spaakbeschermers verkrijgbaar in 22" en 24" diameter. / *Protège-rayons disponibles en diamètres 22" et 24".*



Anti-tippers met hefboomfunctie voor het eenvoudig verwijderen van de wielen. / *Antibascules avec fonction levier pour enlever facilement les roues.*



Afstandsbedieninghouder. / *Support de la télécommande.*



Rubber gecoate hoepels voor meer grip. / *Cerceaux en caoutchouc enduits pour une meilleure adhérence.*



BATTERIES CERTIFIED FOR AIRLINE TRANSPORTATION

Accu's zijn getest om aan alle geldende veiligheidseisen te voldoen voor vervoer per vliegtuig. / *Les batteries sont testées et certifiées afin de répondre à toutes les exigences pour le transport en avion.*

Ergonomisch controle systeem (ECS) (optioneel) / *Système de contrôle ergonomique (ECS) (optionnel)*



Terugrol vertraging / *Dispositif anti-recul*



Afstandsbediening / *Télécommande*



Twee ondersteunende niveaus / *Deux niveaux d'assistance*



Accu monitor / *Ecran d'affichage de la batterie*



Zelfdiagnose / *Autodiagnostic*



Gecodeerde radio-transmissie / *Transmission radio codée*

De ECS combineert therapeutische voordelen met individuele instellingen / *L' ECS combine les avantages thérapeutiques avec les paramètres individuels*

De **e-motion** M15 kan aan- en uitgezet worden met de afstandbediening, terwijl de gebruiker in de stoel zit. Verder is er de keuze uit twee niveaus van motorische ondersteuning voor een optimaal rijcomfort. De terugrolvertraging voorkomt dat de rolstoel achteruit naar beneden rolt en is zodoende een uitstekende hulp bij steile hellingen. De display geeft zowel de status van de batterij als de diverse servicecodes weer, en de grote knoppen maken alle functies erg toegankelijk. Diverse instellingen kunnen met de ECS vrij geprogrammeerd worden. / *L'e-motion peut être allumé et éteint avec la télécommande alors que l'utilisateur reste assis dans son fauteuil. Ensuite, il y a le choix entre deux niveaux de motricité afin de garantir un confort de conduite optimal. Le dispositif anti-recul peut être une grande aide sur des pentes raides. L'écran vous affiche l'état de la batterie et les différents codes de service, qui sont très accessibles grâce aux grandes touches. Plusieurs paramètres, entre autres le niveau d'appui, peuvent être programmés librement à l'aide de l'ECS.*

Technische gegevens / Caractéristiques techniques



max. 6 km/u



25 km (volgens norm / selon la norme ISO 7176-4)



2 x 60 W



1,3 kg

21 kg
(1 wiel / une roue:
11 kg)

130 kg

e-motion

Invacare N.V.
Autobaan 22 . 8210 Loppem
Belgium
Tel. + 32 (0)50 – 83 10 10
Fax. + 32 (0)50 – 83 10 11
Email : belgium@invacare.com
www.invacare.be

© 2013 Invacare International Sàrl
Alle rechten voorbehouden.
Tous droits réservés.

Alle informatie wordt juist geacht ten tijde van druk. Invacare behoudt zich het recht voor productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
Informations données à titre d'information. Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques de ce produit.

e-motion - BE - 04/2013