



Invacare® | **Robin®**

Balans en comfort als uitgangspunt



De plafondliften **Invacare Robin** (handmatige verplaatsing) en **Invacare Robin Mover** (elektrische verplaatsing) kunnen zich perfect aanpassen aan de omgeving van mensen die thuis, in zorginstellingen of in ziekenhuizen wonen. Het uitstekende design zorgt ervoor dat de patiënt in een veilige omgeving, efficiënt en met een gevoel van waardigheid en comfort verplaatst wordt, zonder dat er een juk aan te pas hoeft te komen.



Transfers in alle vertrouwen

- Geen juk nodig: de 2 hijsbanden garanderen een opheffing en verlagings van de patiënt tot 200 kg.
- Bovendien bezorgt de afwezigheid van het juk een gevoel van vrijheid bij de gebruiker en wordt de angst verminderd om tegen het juk te kunnen stoten.

In alle veiligheid

- Rode sluiting : noodstop en noodverlaging.
- De transfer kan uitgevoerd worden m.b.v. de motorunit of de handbediening.
- De motorunit is snel te demonteren, waardoor het eenvoudig verplaatst kan worden naar verschillende ruimtes.
- Een blauw indicatielampje onder de motor: deze knippert indien de batterij bijna leeg is.



Portaal op 2 of 4 voeten



Portaal op 2 voeten

De voeten zijn in hoogte verstelbaar van 2160 tot 2510 mm voor een optimale pasvorm van de patiënt. Ruime keuze aan rails (maat en lengte). Het portaal kan ook worden uitgerust met wielen en remmen.



Portaal op 4 voeten

Bedekt de hele kamer zonder de muren aan te raken. De voeten zijn in hoogte verstelbaar van 2180 tot 2530 mm voor een optimale aanpassing aan de omgeving van de patiënt. Ruime keuze aan rails (maat en lengte). Het portaal kan ook worden uitgerust met wielen en remmen.



Besturingsknoppen op de motorunit

In geval van noodsituaties.



Bevestiging met aflossingssysteem

Vergelijkbaar systeem met autogordels.



Blauw licht brandt wanneer de motor in gebruik is en een indicatielampje knippert indien de batterij bijna leeg is.



Flexiscope

Als een bepaalde situatie een juk vereist.



Robin - Uniek bandensysteem met 2 riemen

Gemotoriseerd zonder juk, manuele verplaatsing



Robin Mover

Met een geïntegreerde railmotor. Voor elektrische horizontale en verticale verplaatsing van gebruikers.



Noodstop en noodverlaging.




Haak sluit vanzelf als er gewicht aan hangt.



Kabelaansluiting voor de handbediening.



Laadt de batterij in de motorunit op wanneer **Robin** niet gebruikt wordt.

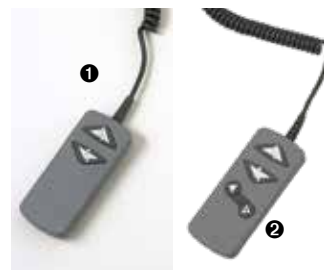

1 Handbediening voor de Robin

Met symbolen voor omhoog / omlaag.

2 Handbediening voor de Robin Mover

Met symbolen voor omhoog / omlaag en horizontale verplaatsing.



Een makkelijk te monteren en gebruiksvriendelijke weegschaal.



Externe batterij in geval van nood.



Eenvoudige montage van de **Robin** zonder gereedschap.



Stretcher die unieke stabiliteit biedt.



- 2-punts juk, 350 mm
- 2-punts juk, 450 mm
- 4-punts juk, 450 mm



Trolley

Aanpasbaar op andere rails.

Railsystemen



3 verschillende maten

S/M/L



Rechte plafondsrail

De rechte rails zijn een ideale oplossing voor transfers van het bed naar de zetel.



Gebogen plafondsrail

De bochten vergroten de flexibiliteit van het systeem en dekt optimaal de hele ruimte af.



Traverse systeem

Dit systeem bedekt alle ruimtes in de kamer en maakt transfers vanaf elk punt in de kamer mogelijk.

Technische gegevens

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op www.invacare.be.

	Lengte van de motor	Breedte van de motor	Hoogte van de motor	Lengte van de hijsband	Hefsnelheid	Totale breedte	Totaalgewicht
Robin	470 mm	250 mm	190 mm	2,5 meter	30 mm/s (85 kg), 40 mm/s (0 kg)	1200 mm	7,3 kg
Robin Mover	470 mm	250 mm	310 mm	2,5 meter	30 mm/s (85 kg), 4 mm/s (0 kg)	1200 mm	10 kg

Max. gebruikersgewicht




Robin	200 kg
Robin Mover	200 kg



Framekleur

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Wit / Grijs



Montage mogelijkheden

De **EC-Track** systemen die bij de **Robin**-lift worden verkocht, bieden een breed scala aan montage mogelijkheden en opties voor alle soorten omgevingen en beperkingen (thuis, zorginstelling).

Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10
 Fax: +32 (0)50 - 83 10 11
 Email: belgium@invacare.com
www.invacare.be

Invacare N.V.
 Autobaan 22 - 8210 Loppem
 Belgium

