


Client :
 N° Client :
 Téléphone :

Correspondant :
 Commission :
 Numéro de série :

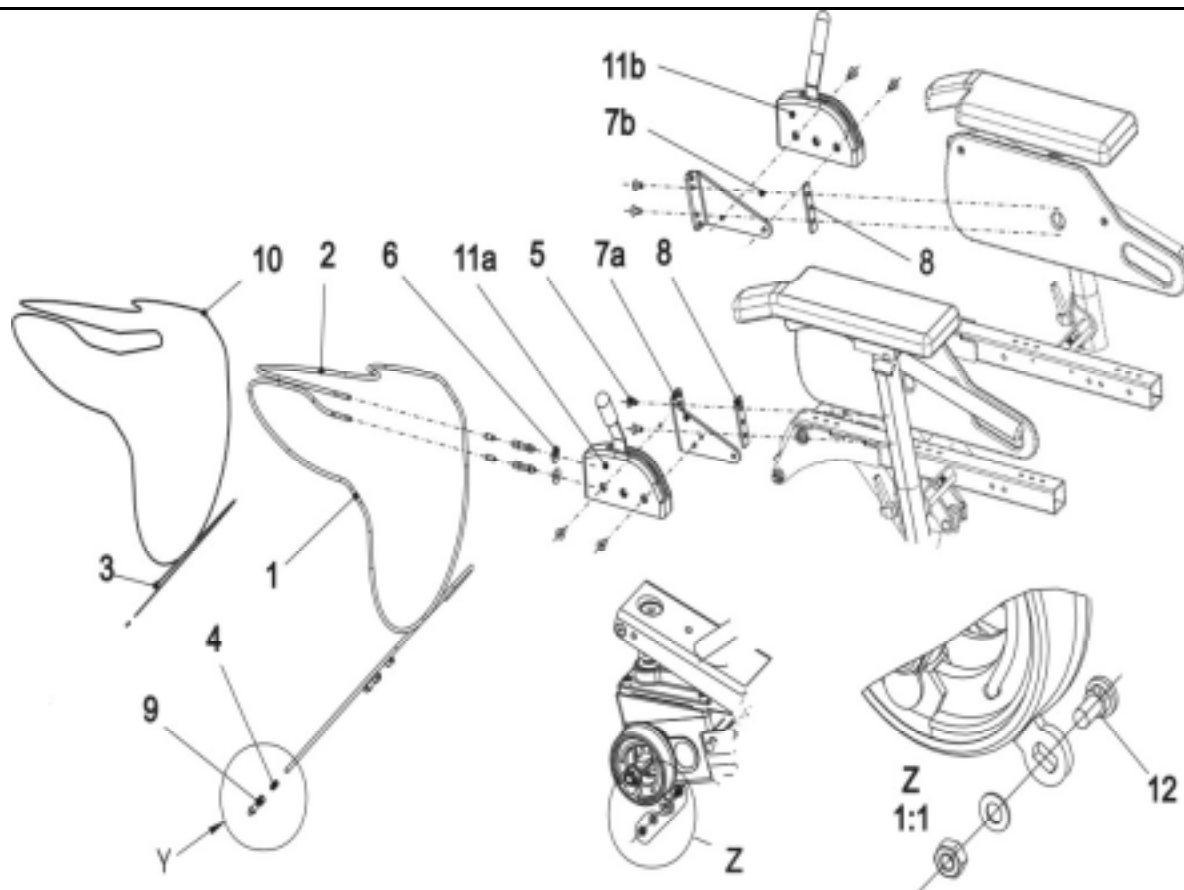

Rep	Qté	Code	Désignation
-	1		FREIN D'IMMOBILISATION D CPL.
-	1		FREIN D'IMMOBILISATION G CPL.
-	1	SP1423473	SET CABLE BOWDEN CPL.
1	1		GAINE DE CABLE BOWDEN L=1130 MM
2	1		GAINE DE CABLE BOWDEN L=1470 MM
3	2		CACHE TERMINAL P. CABLE BOWDEN INTERIEUR
4	4		CACHE TERMINAL P. GAINNE DE CABLE BOWDEN
10	1		CABLE BOWDEN INTERIEUR L=3200 MM
12	2		VIS DE SERRAGE DE CABLE 6 MM
5	4		VIS M6 X 12
6	2		RONDELLE 6,4 X 18 X 1,6
7a	1	1428076-9005	SUPPORT DE BOITE A FREIN D
7b	1	1428075-9005	SUPPORT DE BOITE A FREIN G
8	1	1421720-0002	TOLE A ENCOCHES
9	4	M30050	VIS DE REGLAGE M6 X 24
11a	1	SPF331038	FREIN DROIT PREMONTE
11b	1	SPF331028	FREIN GAUCHE PREMONTE

NON VENDU EN FRANCE

Storm 3



FREIN D'IMMOBILISATION D CPL.
FREIN D'IMMOBILISATION G CPL.

(FREINS TAMBOUR)

Edition
 05 / 2003
 Chapitre 4
 Page 1