



„De eerste preventie van wonden bij een zittende positie, bestaat erin om zich regelmatig op te tillen telkens wanneer het mogelijk is, om een te lange samendrukking van de bloedvaten te beperken en om verademing van de stof toe te laten.“

Max. gebruikersgewicht = 140 kg

Handleiding

- Alle verpakkingselementen moeten verwijderd worden, vóór gebruik.
- Het kussen op een stoel of een rolstoel plaatsen waarbij de kant met de rits wordt naar de achterkant geplaatst. De voorgevormde zijde moet naar boven gericht zijn.
- De Dartex® hoes is waterbestendig, elastisch teneinde het comfort van de patiënt te waarborgen en om de doeltreffendheid van het kussen te optimaliseren.
- Vermijd het gebruik van hoezen en aanvullende opvullingen tussen de patiënt en de producten, want dan loopt men het gevaar dat de doeltreffendheid van het product verminderd. Enkel de transparante, Polyurethaan hoes, die samen met het kussen wordt meegeleverd maakt het mogelijk om de doeltreffendheid van het product te behouden. Deze hoes vergemakkelijkt ook de desinfectie.
- Het schuim (en de gel zak; indien nodig) moet periodiek gecontroleerd worden. Als de hoes beschadigd is geweest, mag het product niet meer gebruikt worden vooraleer een nieuwe hoes werd aangebracht.
- Tijdens het aanbrengen van de hoes, moet men erop toezien dat het kussen juist gepositioneerd wordt.
- Teneinde een grotere stabiliteit in de rolstoel te verkrijgen, moet men gebruik maken van een Invacare® Flo-Tech kussen, omdat men op die manier de helling van het zitzeil kan compenseren.

Beschrijving van het product

De Invacare® Flo-Tech kussens zijn kussens met een ergonomische vorm, bestemd om de druk te verminderen. Ze worden speciaal gevormd om een goede lichaamshouding te waarborgen.

Indien u aanvullende informatie over de Flo-Tech kussens wenst, kan u altijd contact opnemen met de klantendienst van Invacare® .

Herpositionering

Het is belangrijk voor de patiënt om regelmatig van positie te veranderen. Dit verlicht de druk op de gevarenzones ten gevolge drukverhoging op de drukpunten en bewijst zo dat het een hulp is voor de preventie van wonden. Probeer niet om het kussen te verplaatsen met behulp van het handvat, wanneer de gebruiker erop zit.

Schoonmaken en onderhoud

De hoes kan schoongemaakt worden met een oplossing van schoonmaakmiddel en warm water of met behulp van een wegwerpstofdoek, ze kan ook in de wasmachine aan 71°C gewassen worden. Gebruik geen schoonmaakproducten met fenol of alcohol.

De hoes moet minutieus gedroogd worden alvorens terug op het kussen te bevestigen. De hoes mag niet gedroogd worden in droogkast. In geval van grote vlekken, moet de hoes in de wasmachine gewassen worden op 71°C met een oplossing van verdund schoonmaakmiddel.

Kwaliteit en vuurbestendigheid

In onze samenleving is kwaliteit prioritair. Wij werken overeenkomstig de normen ISO 9001:2000 en ISO 13485:2003. Alle MSS producten dragen het CE-kenmerk overeenkomstig de Richtlijn betreffende de geneeskundige apparaten.

De Invacare Flo-Tech® kussens zijn gebonden aan onafhankelijke proeven en vervolgens gewaarborgd aan de norm BS5852: 1990 (vuurreglementering). De hoes wordt getest overeenkomstig de norm BS7175: 1989.



Yes, you can.®

Fabriqu  par Medical Support Systems Ltd.
MSS House, Taffs Fall Road, Treforest Industrial Estate, Cardiff, UK, CF37 5TT
T l. : +44 (0) 1443 849 200 Fax : +44 (0) 1443 843 377
Email : sales@medsys.co.uk Web : www.medsys.co.uk

**Invacare NV –
Autobaan 22 – B-8210 Loppem – Tel. +32 (50) 83 10 10 – Fax. +32 (50) 83 10 11
www.invacare.be**