

ONDERHOUD – VEILIGHEID

Controleer regelmatig de volgende punten om optimale veiligheid te garanderen en om te zorgen dat uw rollator correct blijft functioneren:

- Reinig de rollator met een mild reinigingsmiddel. Veeg hem met een zachte doek droog. Houd de wielen schoon.
- Controleer of alle bouten en moeren goed vastzitten
- Neem direct contact op met uw leverancier als de rollator niet correct werkt.
Gebruik nooit een rollator die defect is. Probeer nooit zelf iets te repareren!

Let op: Uitsluitend te gebruiken als loopsteun. Max. gebruikersgewicht:
P550/2 ACTIO 2 - P550/2-L ACTIO 2-L 130 kg.


INVACARE is niet aansprakelijk voor aanpassingen, verkeerde reparaties, enz. die buiten Invacare om zijn uitgevoerd.

INSTRUCTIES VOOR HET AFVOEREN VAN PRODUCT EN VERPAKKING:


Als u dit product niet langer gebruikt, dient u de rollator, de accessoires en het verpakkingsmateriaal gescheiden aan te bieden bij de afvalverwerking.

Alle belangrijke technische informatie staat op het typeplaatje van de P550/2 ACTIO 2 - P550/2-L ACTIO 2-L.

- 1 : Artikelnummer
- 2 : Productnaam
- 3 : Lotnummer
- 4 : Productiedatum
- 5 : Max. gebruikersgewicht
- 6 : Let op! Zie handleiding.
- 7 : Rollator voor gebruik binnenshuis.
- 8 : Max. breedte van rollator.
- 9 : Naam fabrikant.

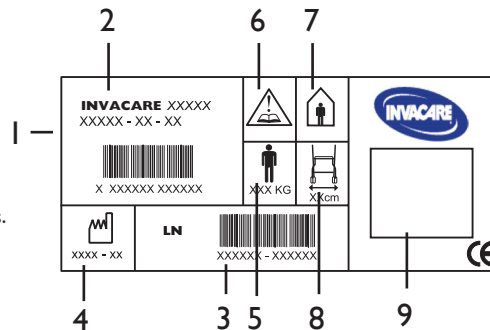

- A 53 cm
- B 74-100 cm
- C 41 cm
- D 38 cm
- E 55 cm
- F 63 cm

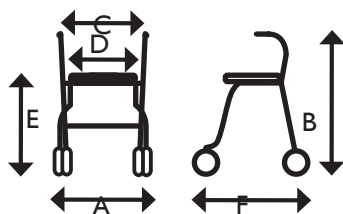

Diameter voor wielen: 11 cm
Gewicht excl. accessoires: 5 kg



Fabrikant:
INVACARE REA AB, Box 200, SE-343 75 DIÖ, SWEDEN
TEL +46 (0)476 535 00, FAX +46 (0)476 535 99


Verkoop:
Nederland: Invacare BV, Celsiusstraat 46, NL-6716 BZ Ede
Tel: (31) (0)318 695 757, Fax: (31) (0)318 695 758
nederland@invacare.com

België: Invacare n.v, Autobaan 22, BE-8210 Loppem
Tel: (32) (0)5 08 31 01 0, Fax: (32) (0)5 08 31 01 1
belgium@invacare.com

151-4380-2 091007



P550/2 ACTIO 2 P550/2-L ACTIO 2-L

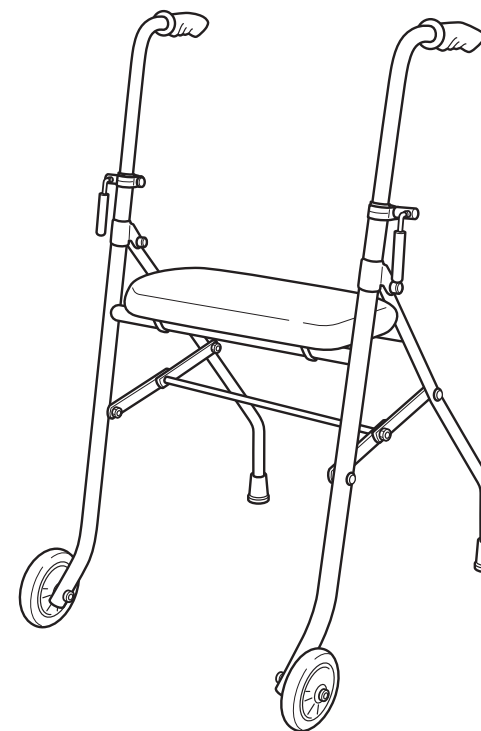

GEBRUIKSAANWIJZING

Lees voor gebruik deze handleiding.

NORMAAL GEBRUIK

Deze rollator is uitsluitend bedoeld als loophulp, elk ander gebruik kan letsel veroorzaken.

Deze rollator is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.

VEILIGHEID

- Gebruik deze rollator alle en binnenshuis.
- Ga nooit op de rollator staan.
- Klap de rollator volledig uit en vergrendel hem bij gebruik als loopsteun.
Let op! Uitsluitend gebruiken als rollator.
- Loop extra voorzichtig over hellende vlakken.
- Gebruik nooit een rollator op roltrappen.
- Loop extra voorzichtig als zware voorwerpen in de mand liggen
- Vervoer voorwerpen uitsluitend in de mand.
U mag maximaal 5kg in de mand vervoeren.
- Draai de handgrepen nooit naar buiten, anders wordt de rollator zijdelings minder stabiel.

HANDGREPEN

Let op! De handgrepen moet en recht naar achteren wijzen tijdens het gebruik. U mag ze nooit naar buiten draaien.




De hoogte van de handgrepen instellen:

- Draai de borghendels open en stel de handgrepen op de gewenste hoogte in. Let op! Zet de handgrepen nooit hoger dan het gedeelte met reliëf op de buizen.
- Draai de borghendels weer vast en zorg dat ze omlaag wijzen, zodat ze niet in de weg zitten tijdens het gebruik van de rollator.
- Controleer of beide handgrepen even hoog zijn afgesteld. De handgrepen moeten normaal gesproken op polshoogte worden afgesteld.

MONTEREN

Verwijder voor het monteren van de rollator de plastic doppen uit de openingen van de buizen.


1. Klap de rollator open naar de gebruiksstand (zie hieronder).
2. Monteer de borghendel met bijbehorende bout en onderlegging. Plaats de borghendel en de onderlegging aan de buitenkant. Controleer of de bout correct in het vierkante montagegat valt.
3. Steek de handgreepbuizen aan weerszijden in de verticale buizen en draai de borghendels vast. Deze moeten bij gebruik van de rollator omlaag wijzen, zodat ze niet in de weg zitten.

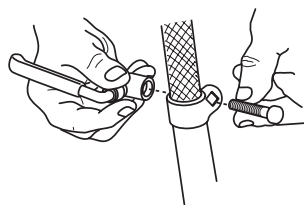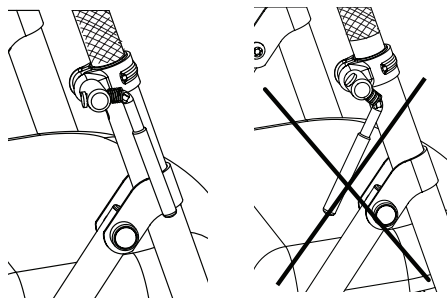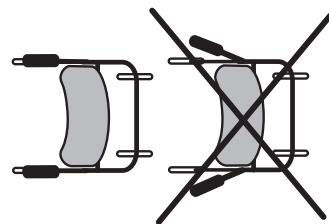

GEBRUIKSSTAND

Klap de rollator open naar de gebruiksstand en vergrendel het klapmechanisme door dit omlaag te drukken. (zie afbeelding)

Let op! Controleer altijd of het klapmechanisme correct is vergrendeld.

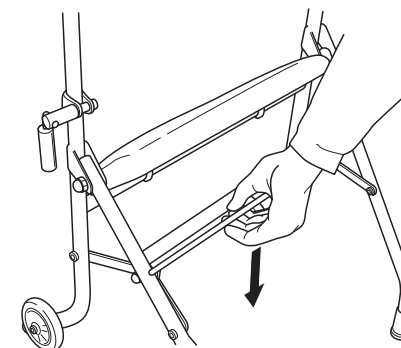

INKLAPPEN

Trek het klapmechanisme omhoog. (zie afbeelding)

Let op! Voorkom beknelling van vingers tussen de voorkant en achterkant van het frame.

